

**Premere il tasto accensione**



**Attendere**




**Strumento pronto**



**Toccare lo schermo**



## Selezionare Test singolo

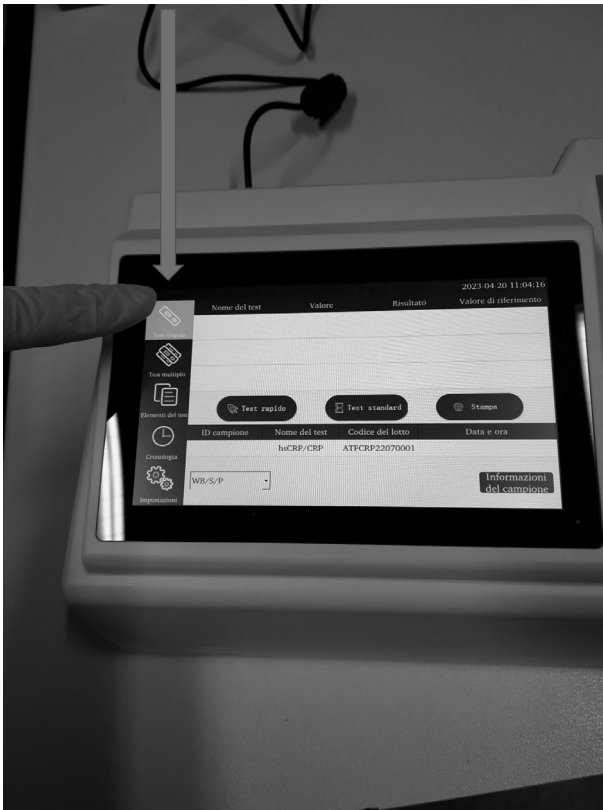

5

## Usare microchip e card dello stesso lotto




6

## Inserire il microchip nella fessura anteriore sinistra dello strumento



7

## Un suono avvertirà che il microchip è stato caricato, il lotto è visibile sullo schermo

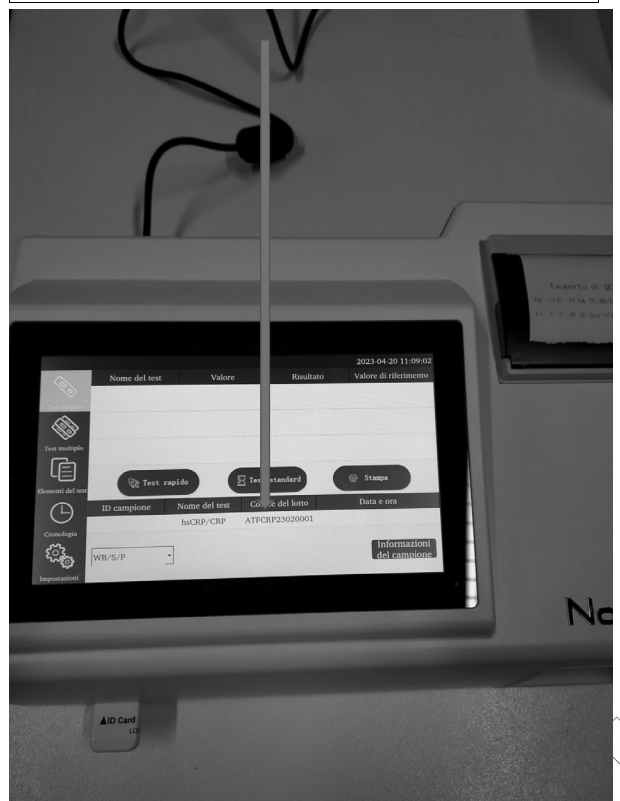

8

**Forare preventivamente la  
provetta del reagente**




9

**Con il tappo capillare prelevare  
il sangue dal dito del paziente**




10

**Inserire il tappo capillare nella  
provetta**

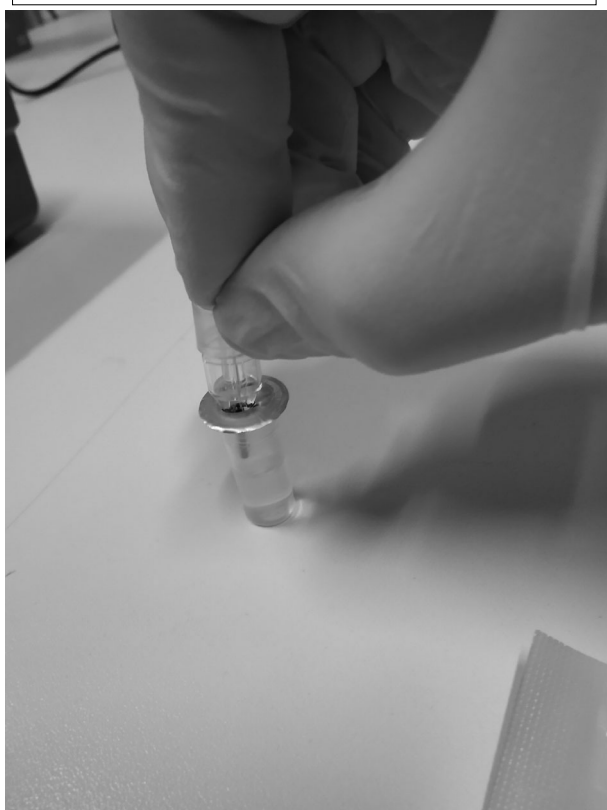


11

**Spingere a fondo**

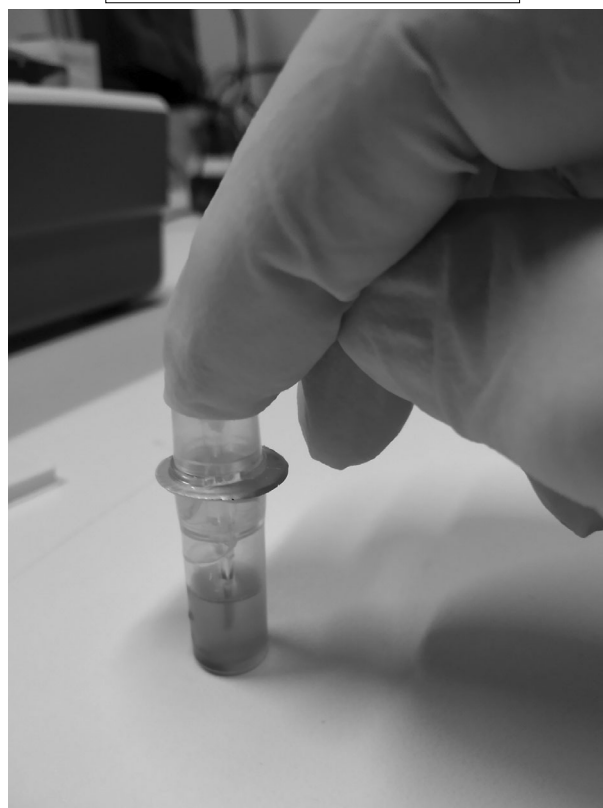


12

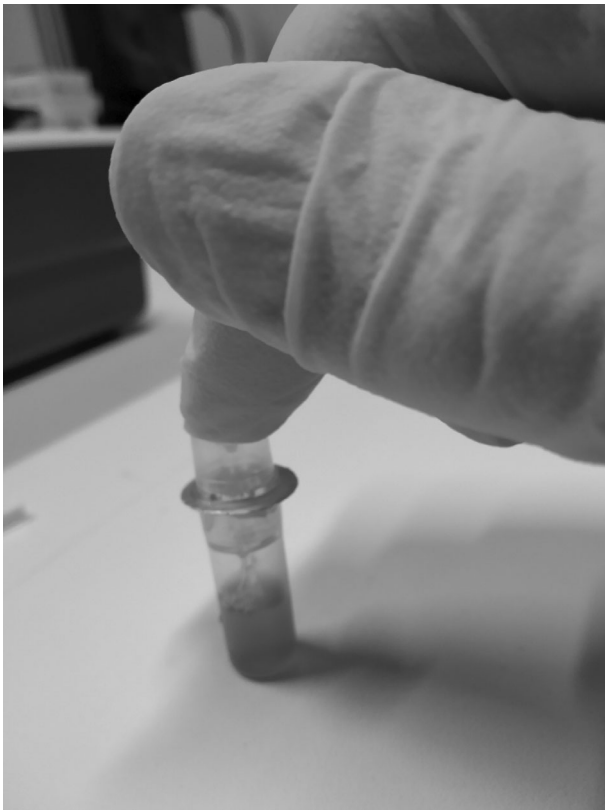


13

**Dopo aver agitato scartare due gocce**

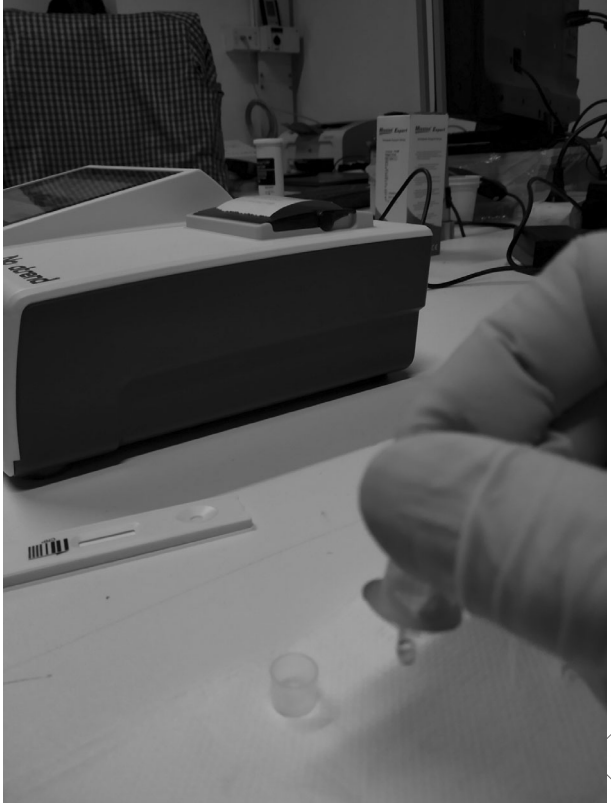

14

**Aggiungere due gocce nel pozzetto della card**

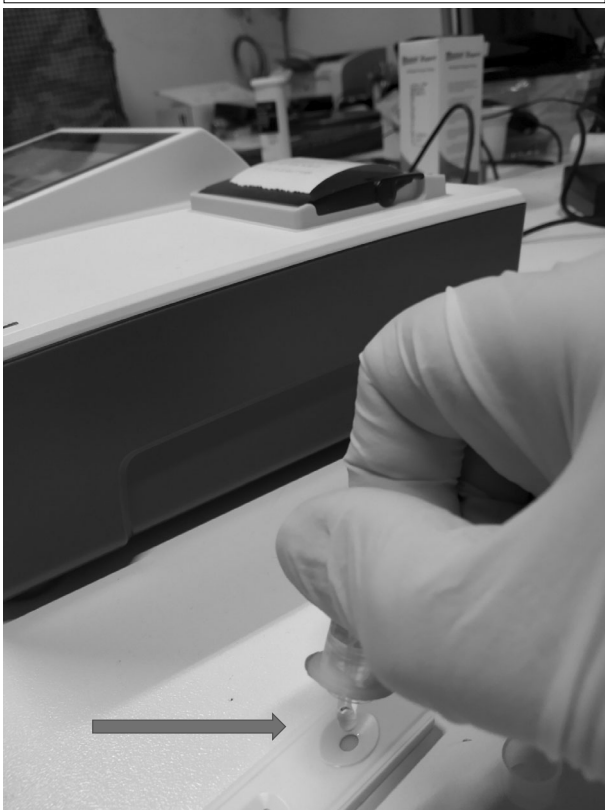


15

**Inserire la card nella fessura anteriore destra dello strumento nel senso della freccia con il barcode verso di voi**




16

## Selezionare Test standard

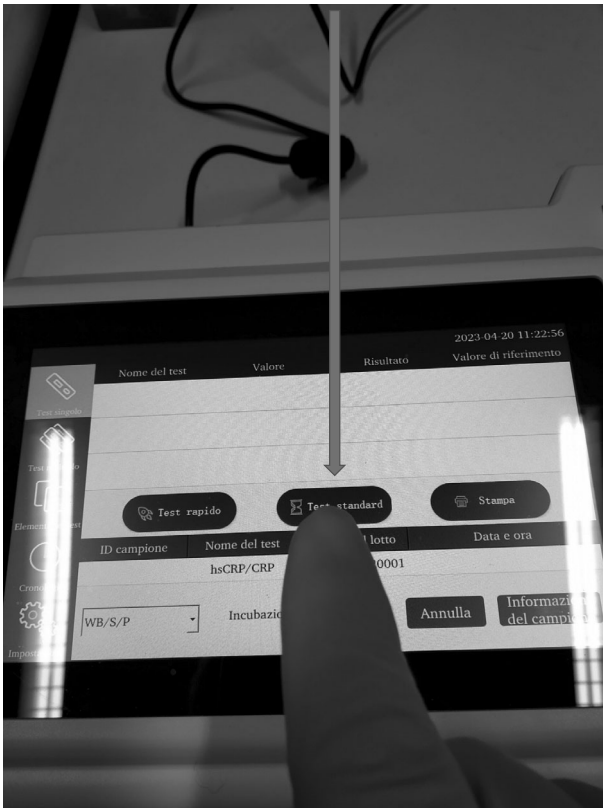


17

## L'incubazione parte automaticamente

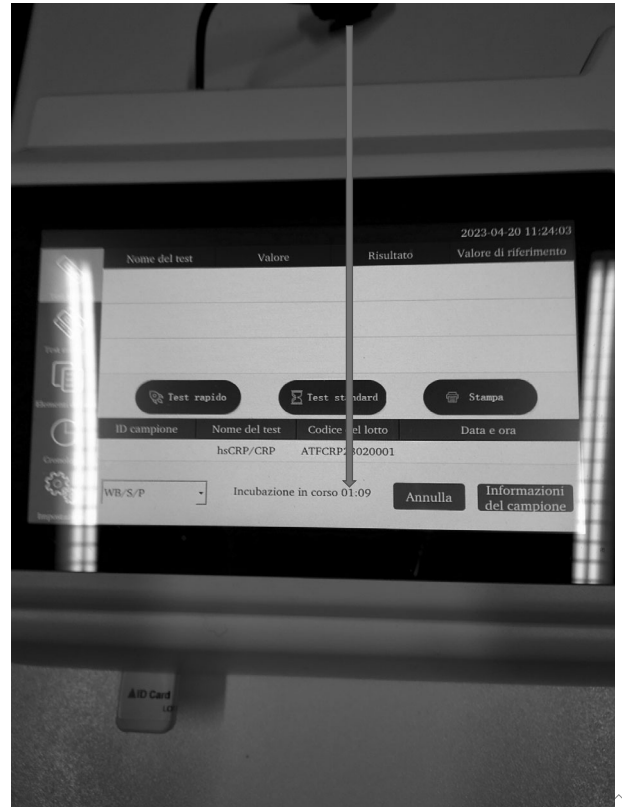


18

## Alla fine dell'incubazione lo strumento automaticamente legge la card

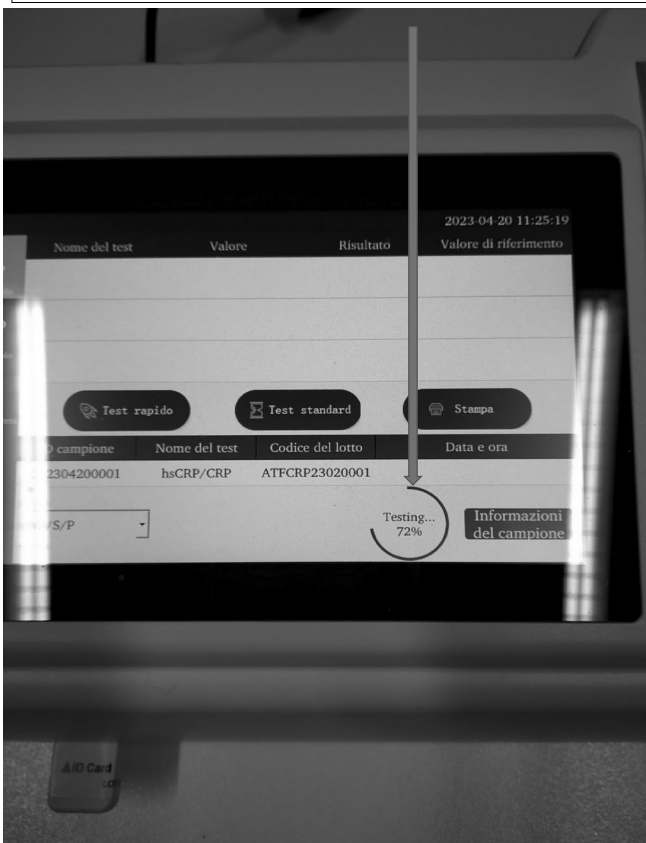

## Sullo schermo si può leggere il risultato

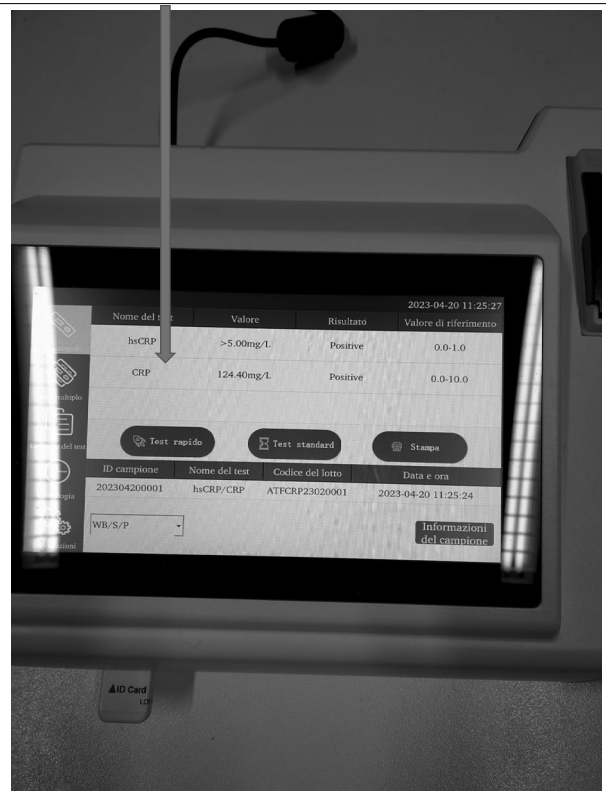

20

## Per stampare il risultato selezionare Stampa



## Risultato stampato

